

nitolic® | INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LAUODERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos destinado ao tratamento abrangente de infestações por piolhos (*Pediculus humanus capitis*).

- Como funciona:
- mata as lêndeas e os piolhos
 - facilita a utilização do pente na remoção dos piolhos e lêndeas
 - depois do tratamento, elimina os piolhos e as lêndeas do ambiente da pessoa afetada
 - mata os piolhos em todas as fases de desenvolvimento



- Ler sempre as instruções antes de utilizar.
Para um tratamento eficaz siga as instruções abaixo:
- Mantenha estas instruções para utilização futura.
 - Utilize apenas conforme indicado e siga as indicações que constam no folheto.
 - Se tiver outras perguntas, contacte o seu médico, prestador de cuidados de saúde ou farmacêutico.
 - Se ocorrer qualquer reação adversa descontinue a utilização do produto e consulte um médico.

LAUODERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos

- 1 LAUODERME® - NITOLIC® dispositivo médico destinado ao tratamento de infestação de piolhos (*Pediculus humanus capitis*)
- 2 LAUODERME® - NITOLIC® removedor de lêndeas Este dispositivo médico destina-se a ser utilizado como auxiliar no tratamento da pediculose causada por piolhos (*Pediculus humanus capitis*), facilita a remoção dos ovos do cabelo, tornando-o mais fácil de pentear e hidratar.
- 3 LAUODERME® - NITOLIC® lavagem de roupa aditivo para lavar roupa, para a remoção dos piolhos e das lêndeas de tecidos (roupas pessoais, roupa de cama, etc.)
- 4 LAUODERME® - NITOLIC® pente de remoção para exame de diagnóstico visual do cabelo e remoção dos piolhos e lêndeas, depois do tratamento
- 5 LAUODERME® - NITOLIC® touca de proteção
- 6 Lista de Contactos Recentes
- 7 LAUODERME® - NITOLIC® folheto para crianças que ajudará o tempo a passar de forma mais agradável para o seu filho durante o tratamento, também explicará que o problema dos piolhos não é tão assustador como parece.



INFORMAÇÕES ÚTEIS sobre os piolhos e o LAUODERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos.

O piolho é um pequeno (2,0-4,7 mm), inseto sem asas com um perfil achatado. A cor dos piolhos varia de branco-amarelado a escuro e tendem a combinar com a cor do cabelo do hospedeiro. Os piolhos alimentam-se de sangue humano várias vezes ao dia e vivem junto do couro cabeludo humano. Os piolhos movem-se trepando pelo cabelo com três pares de patas semelhantes a garras. O piolho adulto respira através de 7 pares de espiráculos no tórax e no abdômen.



LAUODERME® - NITOLIC® espalha-se rápida e uniformemente pelo couro cabeludo, cobrindo firmemente os piolhos (tecnologia o-effect). Enche os espiráculos dos piolhos, eliminando-os, assim rapidamente.



o-effect[®] technology

100% eficaz em todas as fases de desenvolvimento dos piolhos

A característica principal deste dispositivo médico para o tratamento dos piolhos é a aplicação rápida e uniforme no couro cabeludo e no cabelo prestada pela tecnologia o-effect[®].

CICLO DE VIDA DOS PIOLHOS



RESISTÊNCIA DOS PIOLHOS E LAUODERME® - NITOLIC® DISPOSITIVO MÉDICO

Os piolhos desenvolveram resistências aos inseticidas tradicionais, que atuam ao perturbar os processos fisiológicos, o que por sua vez resulta na falha dos tratamentos. O bloqueio mecânico do aparelho respiratório do piolho, conceito em que LAUODERME® - NITOLIC® é baseado, elimina a possibilidade dos piolhos se tornarem resistentes a este tratamento específico.



LAUODERME® - NITOLIC® removedor de lêndeas dissolve a substância semelhante a um cimento que o piolho usa para fixar os ovos e facilita a remoção destes, bem como o pentear, após o tratamento.



As lêndeas podem viver fora do hospedeiro até 14 dias.

LAUODERME® - NITOLIC® pente de remoção ajuda a remover os piolhos e os ovos (lêndeas) depois do tratamento.

LAUODERME® - NITOLIC® lavagem, impede que os piolhos se espalhem. É recomendado para a prevenção primária e secundária de piolhos como um aditivo de roupa para lavar artigos pessoais que possam ter estado em contacto com a cabeça da pessoa com piolhos (roupas pessoais, roupas de cama, etc.).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

DICAS IMPORTANTES

Para proporcionar a eliminação e evitar novas infestações, o tratamento necessita de ser administrado simultaneamente a todos os membros da família que possam estar infestados. O tratamento contra os piolhos deve ser realizado com boa iluminação. É importante aplicar o produto desde o couro cabeludo às pontas do cabelo. Para um tratamento eficaz aplique LAUDERME® - NITOLIC® cuidadosamente em todo o couro cabeludo e cabelo. Aplique primeiro, atrás da orelha, para a parte de trás do pescoço, à volta dos cabelos do pescoço e no contorno do couro cabeludo.



No caso de cabelo comprido, divida o cabelo em quatro secções: da frente para trás e de orelha a orelha.



Aplicar LAUDERME® - NITOLIC® no cabelo completamente seco, da raiz à extremidade do cabelo. Primeiro aplicar por detrás das orelhas, a parte de trás do pescoço e em torno da linha do cabelo.



Sature o cabelo e o couro cabeludo com LAUDERME® - NITOLIC® para garantir que todos os piolhos e lêndeas são completamente cobertos.



Depois do tratamento, ponha a touca de proteção na cabeça durante **1 hora**. A touca de proteção está incluída na embalagem de LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos e lêndeas. **CUIDADO!** Por favor observe cuidadosamente as indicações e o tempo de exposição.



Tire a touca de proteção LAUDERME® - NITOLIC® e lave o cabelo com água e champô.



Retire os piolhos e lêndeas do cabelo usando o pente de remoção LAUDERME® - NITOLIC®.



Todas as roupas (roupas pessoais, roupa de cama, etc.) que possam ter estado em contacto com a cabeça da pessoa com piolhos devem ser lavadas com LAUDERME® - NITOLIC® lavagem de roupa (ver lavagem de roupa). A informação do produto do LAUDERME® - NITOLIC® lavagem de roupa, encontra-se na embalagem.

DICAS PARA PENTEAR

Divida o cabelo comprido em secções e prenda cada secção. Levante da secção maior uma pequena secção de cabelo para deixar visível o couro cabeludo. Comece a pentear cuidadosamente os fios de cabelo, arrastando o LAUDERME® - NITOLIC® pente removedor firmemente da base para as pontas. Volte a prender os fios de cabelo que acabou de pentear. Limpe os ovos e lêndeas dos dentes do LAUDERME® - NITOLIC® pente removedor com um lenço.




Se tiver outras perguntas, contacte o seu médico, prestador de cuidados de saúde ou farmacêutico.



Como retirar as lêndeas do cabelo?

Dependendo do comprimento do cabelo, as lêndeas podem continuar ainda agarradas ao cabelo mesmo depois do tratamento. LAUDERME® - NITOLIC® removedor de lêndeas dissolve a substância semelhante a um cimento que o piolho usa para prender os ovos, tornando assim mais fácil o pentear e a remoção dos ovos. A informação do produto do LAUDERME® - NITOLIC® removedor de piolhos encontra-se na embalagem.

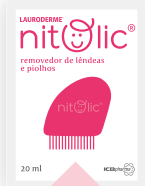

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- LAUDERME® - NITOLIC® demonstrou que uma única utilização deste dispositivo proporciona 100% de eficácia contra todas as fases ativas de desenvolvimento dos piolhos, incluindo lêndeas, sem necessidade de repetição do tratamento.
- A forma mais usual de apanhar piolhos é estar em contacto com alguém que já está infestado, assim pode acontecer uma nova infestação, p. ex., creche ou escola. É importante inspecionar o cabelo cuidadosa e regularmente para ver se há piolhos, pelo menos uma vez por semana.
- LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento para piolhos, é um dispositivo médico de utilização múltipla. Ao contrário de outros produtos para os piolhos, graças ao método específico de ação, elimina a possibilidade dos piolhos se tornarem resistentes ao tratamento.
- Para mais informações sobre piolhos e LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos, visite www.nitolic.com

INFORMAÇÕES RELATIVAS À APLICAÇÃO

AVISOS:

Utilizar LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos, apenas conforme indicado, siga as instruções do folheto

Evitar o contacto de qualquer produto incluído em LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos, com os olhos, a boca, nariz ou garganta. No caso de contacto com os olhos, lave abundantemente com água durante 10 ou 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte o médico ou o farmacêutico.

LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos, destina-se apenas a uso externo. Não aplicar em cortes, feridas ou pele irritada.

Antes de utilizar LAUDERME® - NITOLIC® e LAUDERME® - NITOLIC® removedor de piolhos, aplique uma pequena quantidade de LAUDERME® - NITOLIC® e LAUDERME® - NITOLIC® removedor de piolhos, na palma da mão para verificar qualquer reação adversa.

Utilizar o tratamento em crianças apenas sob a direta supervisão de um adulto.

Os pavimentos ficarão escorregadios se entrarem em contacto com o produto. Lave imediatamente os derrames.

LAUDERME® - NITOLIC® e LAUDERME® - NITOLIC® removedor de piolhos podem reagir com alguns tratamentos capilares e loções de coloração de cabelo

CONTRA-INDICAÇÕES

Não utilizar se for alérgico a qualquer dos ingredientes de LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento.

Não aplicar em cortes, feridas ou pele irritada.

Não utilizar nenhum dispositivo médico incluído em LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento após a data de validade indicada na embalagem.

Não utilizar em crianças com menos de 2 anos.

EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Podem ocorrer os seguintes efeitos secundários: irritação, vermelhidão e inflamação da pele.

Na eventualidade improvável de ocorrerem os referidos sintomas, pare imediatamente a utilização de LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento e contacte o seu médico.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CONTEÚDO:

- LAUDERME® - NITOLIC®: ciclotimicone, polisorbato 80, miristato de isopropilo
- LAUDERME® - NITOLIC® removedor de lêndeas: Água, ácido acético, quaternium-91, cloreto de berntirimónio, miristato miristílico, álcool cetearílico, acetato de tocoferilo, fragância.

- LAUDERME® - NITOLIC® lavagem de roupa: 1,25% benzoato de benzilo, 0,02% 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona
- LAUDERME® - NITOLIC® touca de proteção de cabelo: Película de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), 100% borracha natural

ARMAZENAGEM:

Conservar LAUDERME® - NITOLIC® sistema de tratamento de piolhos, em ambiente seco, escuro, com uma temperatura entre 5°C-40°C. A embalagem vazia é reciclável.



FABRICANTE:

ICB PHARMA
Tomasz Świętosławski,
Paweł Świętosławski
Spółka Jawna
6a Moździerzowców St.
43-602 Jaworzno
Poland

DISTRIBUÍDO POR:

Baldacci Portugal, S.A.
Rua Cândido de Figueiredo, 84-B
1549-005 Lisboa
Portugal
www.baldacci.pt



VER O RÓTULO



ESTAMOS EMPENHADOS NA SUA SATISFAÇÃO COM ESTE PRODUTO. PARTILHE A SUA OPINIÃO CONNOSCO EM:

@ baldacci@baldacci.pt

